

## Zweckbestimmung

Die Gehstöcke sind für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dienen der Erhöhung der Gangsicherheit. Die Anwendung dieser Gehstöcke kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. **Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und das max. Körpergewicht bei der Benutzung der Gehstöcke!**

**Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung des Gehstockes einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!**


## Gewährleistung

Auf die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine **Garantie von 24 Monaten**. Hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

## Montage und Inbetriebnahme

### Griffhöhenverstellung der Gehstöcke

- Quetschverschraubung (A) durch Linksdrehung lösen.
- Clip (C) herausziehen.
- Aluminiumrohr in die gewünschte Position verschieben.
- Clip wieder ganz eindrücken.
- Quetschverschraubung (A) durch Rechtsdrehung festdrehen. Das Festdrehen vermindert die Geräuschbildung bei der Benutzung.

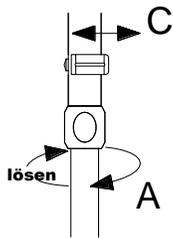

### Längen Anpassung des Alurohres Gehstöcke mit durchgängigem Rohr

- Länge des Alurohres („Anwenderbedingt“) ermitteln.
- Aluminiumrohr leicht einspannen.  
(Formbacken oder anderweitigen Schutz verwenden!)
- Wir empfehlen zum Kürzen des Rohres einen Rohrschneider zu verwenden (auf geraden Schnitt achten!).
- Schnittkante (innen- und außenseitig) entgraten.
- Saugkapsel bis zum Anschlag aufdrücken/Festen Sitz prüfen.

## Pflege


Zur Pflege verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben den Gehstock mit einem Tuch trocken ab.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel (Produktthinweise beachten!) mit aggressiven Lösungszusätzen (Öl, Säuren, Benzin, Verdünner), sowie harte Reinigungsgegenstände (Bürsten), da sonst die Kunststoffoberfläche beschädigt wird oder sich Ablagerungen an Kunststoffteilen und anderen Materialien bilden können.

**Bei der Verwendung von Desinfektionsmittel beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!**

## Wartung

Eine abgenutzte oder beschädigte Saugkapsel (Verschleißteil) ist umgehend auszutauschen. Ziehen Sie die Saugkapsel vom Ende des Rohres ab. Eine neue Saugkapsel (auf Kapselgröße und Ausführung achten/siehe Tabelle) bis zum Anschlag aufdrücken und den festen Sitz überprüfen.

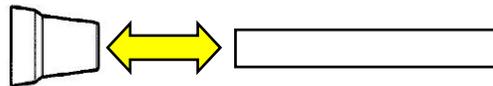

Verbogene oder beschädigte Gehstöcke dürfen nicht weiterverwendet werden, da die erforderliche Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. Wegen der Bruchgefahr dürfen Gehstöcke nicht nachgerichtet werden.

Liegt eine Beschädigung des Gehstockes vor, wenden Sie sich zur Durchführung einer Instandsetzung an einen Fachhändler. **Nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.**

**Lassen Sie Ihren Gehstock mindestens einmal halbjährlich von einem Fachhändler überprüfen.**

## Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Produkte sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt vom regulären Hausmüll zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.

## Hinweis!

**Diese Bedienungsanleitung können Sie über unsere Homepage [www.rebotec.de](http://www.rebotec.de) ansehen. Dies ermöglicht Informationen auszudrucken und bei Bedarf vorzulesen.**

**> Zubehör für Gehstöcke wird ebenfalls angeboten. <**



## Sicherheitshinweise



- **Vor Erstinbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen, um evtl. Schäden durch Fehlbedienung oder Gefährdungen (Restrisiken) zu vermeiden.**
- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!**
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie die Gehhilfe nicht in Gebrauch. Wenden Sie sich an einen Fachhändler zwecks Überprüfung!
- Umfassen Sie bei der Benutzung den Handgriff der Gehhilfe mit einer Hand vollständig und fest.
- Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer Hilfsperson begleiten und stützen, damit Sie diese bei einem eventuellen Fallen auffangen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung-gegebenenfalls erneuern.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf oder nach vorne in Gehrichtung.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckentfremdet werden. Deshalb benutzen Sie diese nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit und nicht z.B. als Aufstehhilfe, zum Hebeln, versetzen von Möbeln und anderen Gegenständen.
- Es dürfen keine eigenständigen mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Produkthaftung!).
- An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) anhängen.
- Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen (am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe). Hitze kann zu Veränderung der Materialeigenschaften und Haltbarkeit führen.
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden, **es besteht Rutschgefahr!**
- Griff(e) oder Saugkapsel niemals mit ölhaltigen Substanzen reinigen, **es besteht Rutschgefahr!**
- Vorsicht bei Unebenheiten oder Löcher im Boden, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann!
- Vorsicht bei der Benutzung der Gehhilfe auf losen Untergrund wie Kies, Sand oder Laub, da der Halt stark eingeschränkt ist!

Modell	Artikel-Nummer	verstellbar	verstellbar / 10 fach	überlang	abängbar	Quetsch-Clip	Standard-Clip	durchgängiges Rohr	Griff-Simplex	Griff-Fischer	Griff-Handy	Griff-Anatom	Alurohr / silber	Alurohr / farbig	Alurohr / gepulvert	Griffhöhe von-bis / cm	Kapselgröße / Ø mm	max. Körpergewicht/kg
	133....		X			X			X					X		73 - 96	17	125
Anatom / links	142....		X			X						X		X		73 - 96	17	100
Anatom / rechts	144...		X			X						X		X		73 - 96	17	100
Handy / links	136...		X			X				X				X		72 - 95	17	125
Handy / rechts	138...		X			X				X				X		72 - 94	17	125
Fischer / links-rechts	146./148.		X			X				X				X		70 - 93	17	125
Fischer / links-rechts	147./149.				X			X		X					X	max. 110	17	125
Simplex	133.22.15		X			X			X			X				74 - 96	19	150
Anatom / links	142.22.15		X			X						X		X		74 - 96	19	150
Anatom / rechts	144.22.15		X			X						X		X		74 - 96	19	150
Simplex	133.22.16		X	X		X			X				X			84 - 106	19	150
Anatom / links	142.22.16		X	X		X						X		X		84 - 106	19	150
Anatom / rechts	144.22.16		X	X		X						X		X		84 - 106	19	150
Simplex	133.22.17		X			X			X							74 - 96	19	175
Anatom / links	142.22.17		X			X						X		X		74 - 96	19	175
Anatom / rechts	144.22.17		X			X						X		X		74 - 96	19	175
HEMI / Mini-links	121.10.10	X					X						X			124 - 144	19	100
HEMI / Mini-rechts	121.10.20	X				X							X			124 - 144	19	100
HEMI / Maxi-links	121.20.10	X				X							X			146 - 188	19	100
HEMI / Maxi-rechts	121.20.20	X				X							X			146 - 188	19	100

Produkt-Gehstöcke/ Rohre: eloxierte Alu-Legierung / Handgriffe: Polypropylen (PP) , PUR-Schaum / (Fertigungstoleranzen-Rohre: +/- 0,5 cm)

### Wiedereinsatz

Die REBOTEC Gehstöcke sind für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz sind die Produkte durch den Fachhandel oder durch den Hersteller zu überprüfen, (unter Beachtung der Wartungshinweise), zu reinigen, zu desinfizieren und für den erneuten Einsatz frei zugeben.

Wir verweisen auf das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetrreibV).

### Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produktes beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **2 Jahre**. Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Hierbei sind die Angaben zum Wiedereinsatz (siehe oben) der Unterarmgehstützen zu beachten!



Modellauswahl

Handgriff-Formen



**REBOTEC®** Rehabilitationsmittel GmbH  
 DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59  
 Telefon: 05431/9416-0  
 Telefax : 05431/9416-66  
<http://www.rebotec.de>  
 E-Mail: info@rebotec.de



BA-Nr.: 01.03.006/2016-12



## Bedienungsanleitung

# Gehstöcke